

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
CENTRIFUGA CAPILAR-EUREKA

PP- 007
VER.- 00
FOL.-7



DESCRIÇÃO PARA A ATIVIDADE:

- ✓ Preencher um tubo capilar com sangue até $\frac{3}{4}$ da sua altura;
- ✓ Fechar uma das extremidades na chama de uma lamparina (massa de modelar ou outros materiais podem ser utilizados para a oclusão do capilar);
- ✓ Colocar o capilar em uma centrífuga apropriada (centrífuga própria para microhematócrito - figura 2) por 5 minutos em 10000 a 12000 rpm;
- ✓ Para caprinos a centrifugação é realizada por 15 minutos devido ao fato de que esta espécie apresenta o menor volume globular médio, ou seja, o menor volume eritrocitário.